



ALKOMAT
X5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



iOS



ANDROID





Drogi Kliencie, gratulujemy wyboru! Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją użytkowania by zakupione urządzenie służyło jak najlepiej.



SCHEMAT I SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

rodzaj sensora	elektrochemiczny
zakres i dokładność prezentowanego pomiaru	0,00‰ - 4,00‰ z dokładnością do: 0,01‰
precyzja pomiaru	+/-0,1‰ przy 1,00‰
kalibracja	co 12 miesięcy lub 500 pomiarów
wymienny sensor	tak - tylko przez serwis
wymaga ustnika	tak
zasilanie	1 x AAA 1,5V alkaliczna
wymiary i waga (szer./wys./gł.)	41 x 67 x 17 mm 43 gramy z baterią
inne	bluetooth 4.0 współpraca z aplikacją mobilną w smartfonie / tablecie podświetlany ustnik komunikaty diodowe



PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY

Włóż baterię do urządzenia zgodnie z polaryzacją **[UWAGA - używaj wyłącznie baterii alkalicznych!!!!]**. Następnie włóż ustnik do otworu pomiarowego.





UWAGA! ZANIM ROZPOCZNIESZ POMIAR!


Po wypiciu alkoholu przepłucz usta i odczekaj 30 minut. Jest to czas niezbędny do wchłonięcia alkoholu do krwi i zmniejszenia jego oparów w ustach i ślinie. **Dla poprawnego pomiaru nie jedz, nie pij i nie pal papierosów przez min. 30 minut przed pomiarem.** Nie dokonuj pomiarów na silnym wietrze, w klimatyzowanych pomieszczeniach i w zanieczyszczonym powietrzu.

Wiele czynników może zakłócać wyniki pomiaru (silne zanieczyszczenie środowiska, palenie papierosów, różne opary gazowe, wiatr, klimatyzacja) stąd wyniki prezentowane przez alkomat są jedynie wynikami szacunkowymi. Producent, importer oraz sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za poprawność wyników oraz za ew. szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem alkomatu. Urządzenie w myśl polskiego prawa nie może służyć jako alkomat dowodowy.

maksymalizacja wiarygodności pomiaru:



Stężenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu zmienia się w czasie. Najpierw rośnie podczas wchłaniania alkoholu do krwi, następnie maleje podczas eliminacji (spalania) przez organizm. Najważniejszą informacją jaką ma wskazać alkomat jest to w której fazie się znajdujesz - wzrostu stężenia czy eliminacji alkoholu. Chcąc uzyskać wiarygodny wynik dokonuj pomiarów kiedy nie zamierzasz już spożywać alkoholu. Sugerujemy wykonać **min. 3 pomiary w równych 30 minutowych odstępach czasu i zapisywać poszczególne wyniki.** Porównanie tych wyników odpowie na pytanie, w której fazie się znajdujemy - za pomocą 3 malejących wyników dokonanych w równych odstępach czasu możemy oszacować kiedy organizm będzie oczyszczony z alkoholu.

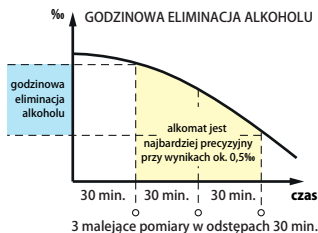



ALCOFORCE XS UMOŻLIWIA WYKONYWANIE POMIARÓW NA DWA SPOSOBY

PRZY UŻYCIU SMARTFONA

- wymaga zainstalowania kompatybilnej z alkomatem XS aplikacji AlcoFind
- umożliwia wgląd w dokładny wynik pomiaru
- informuje użytkownika o statusie urządzenia
- automatycznie generuje historię wykonanych pomiarów wraz z opcjonalnymi komentarzami i zdjęciami osób badanych
- pozwala na udostępnianie wyników przez SMS, media społecznościowe itp.

POMIAR SAMODZIELNY

- nie wymaga żadnych zewnętrznych urządzeń
- wyniki pomiarów wyświetlane są progowo za pomocą diód LED
- dłuższa praca urządzenia na baterii



Zeskanuj QR kod, aby pobrać kompatybilną z XS aplikację AlcoFind. Aplikację możesz również pobrać ze sklepu Google Play/ App Store.

UWAGA

Aby skorzystać z aplikacji Alcofind kompatybilnej z XS, musisz posiadać system Android w wersji 4.3 lub wyższej. Aplikacja jest dostępna również na system iOS 7 lub wyższy.

POMIAR PRZY UŻYCIU SMARTFONA

Upewnij się, że pomiar dokonywany będzie w warunkach niezakłócających pracy urządzenia. Następnie postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Krok 1



Uruchom aplikację Alcofind na smartfonie. Wybierz preferowany język i jednostki.

Krok 2



Przytrzymaj przycisk włącznika alkomatu XS. Komunikat „Skanowanie” oznacza, że aplikacja poszukuje alkomatu.

Krok 3



Podczas pierwszego użycia musisz sparować urządzenie z aplikacją w telefonie wpisując odpowiedni ciąg liczb.

Krok 4



Po komunikacie „Rozpocznij pomiar”, potwierdź start testu przyciskając ekran.

Krok 5



Pojawi się komunikat „Przygotowanie” i odliczanie do 100. Przygotuj się do pomiaru.

Krok 6



Weź głęboki wdech i dmuchaj w ustnik alkomatu, aż licznik na smartfonie osiągnie 100. XS zasygnalizuje pobieranie próbki za pomocą pulsującego niebieskiego światła.

Krok 7



Na ekranie telefonu pojawi się dokładny wynik. Jednocześnie za pomocą diod XS będzie sygnalizował wyniki z przedziałów:

do 0,1 promila – zielony ciągły,

w przedziale od 0,1 do 0,2 – zielony pulsacyjny,

od 0,2 promila do 0,5 czerwony ciągły,

powyżej pół promila – czerwony pulsacyjny.

POMIAR SAMODZIELNY

Upewnij się, że pomiar dokonywany będzie w warunkach niezakłócających pracy urządzenia. Następnie postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.



Niebieska dioda podświetlająca ustnik:
-migająca powoli: przygotowanie do pomiaru,
-sygnał ciągły: dmuchaj,
-migająca szybko: pobieranie próbki.



Mrugająca na przemian zielona i czerwona dioda:
analiza pobranej próbki powietrza.



Zielona dioda wskazuje na to, że wynik pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi **zero**.



Czerwona dioda wskazuje na każdy wynik pomiaru różny od zero i oznacza, że w wydychanym powietrzu znajduje się alkohol.



KALIBRACJA

Kalibracja to pojęcie nierozdzielnie związane z KAŻDYM ALKOMATEM. Oznacza to, że co ok. 12 miesięcy alkomat należy ponownie skonfigurować by poprawnie interpretował wskazania zużywającego się czujnika. O konieczności kalibracji świadczą odpowiednie komunikaty oraz wyniki zdecydowanie odbiegające od rzeczywistości - np. 0,5‰ mimo braku spożycia alkoholu.

**UWAGA - KALIBRACJA TEGO ALKOMATU W OKRESIE 12 m-cy OD DATY ZAKUPU
JEST BEZPŁATNA W SIEDZIBIE ALCOFORCE, PROMILER, SPEED-UP
I INNYCH AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SERWISOWYCH**

Konieczność kalibracji nie jest wadą alkomatu i nie podlega reklamacji. Proszę nie oczekiwać, że niekalibrowany regularnie alkomat będzie wskazywał poprawne wyniki. Kalibrację po upływie okresu gwarancyjnego są płatne i można ich dokonywać w siedzibie SPEED-UP (również wysyłkowo) lub w innym autoryzowanym punkcie serwisu alkomatów.



PRZECHOWYWANIE I UWAGI OGÓLNE

Przechowywać w suchym miejscu, unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne (np. „podszybie” samochodu) i temperatur spoza zakresu 0-40 °C. Nie wdychać płynów i dymów do czujnika oraz nie zanurzać urządzenia w płynach. Nie należy czyścić urządzenia z użyciem detergentów. **Dmuchiwanie w alkomat bezpośrednio po spożyciu alkoholu, przechowywanie alkomatu w pobliżu lotnych substancji, w tym alkoholu może spowodować trwałe uszkodzenie czujnika i nieprawidłowe pomiary.**



SERWIS I REKLAMACJE

**SPRZEDAWCA NIE PRZYJMUJE ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH
zgłoszenia rozpatruje serwis centralny SPEED-UP / ALCOFORCE**

PRZECZYTAJ ZANIM ODDASZ URZĄDZENIE DO NAPRAWY:

Urządzenie, którego używasz to wysokiej jakości alkomat screeningowy (nie dowodowy), które jak każdy specjalistyczny sprzęt wymaga od Ciebie nieco znajomości jego specyfiki. Dlatego zanim zdecydujesz się oddać alkomat do naprawy przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Być może znajduje się tam rozwiązanie Twojego problemu.

GŁÓWNE POWODY NIEZASADNYCH REKLAMACJI

1. Dekalibracja urządzenia - prześlij je nam do kalibracji w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu a usługę kalibracji wykonamy **GRATIS!!!** Więcej informacji znajdziesz pod adresem: **alkotester.pl**
2. Stosowanie niewłaściwych lub zużytych baterii. Nawet świeżo zakupione baterie mogą okazać się być stare i mieć obniżone napięcie. Pamiętaj by używać wyłącznie wysokiej jakości baterii **alkalicznych**.
3. Wrażenie, że alkomat wskazuje niewłaściwie. Być może jest to oznaka konieczności kalibracji urządzenia - ale niekoniecznie. Każdy człowiek ma inną zdolność do metabolizmu alkoholu i zdolność ta może ulegać okresowym zmianom w zależności od wielu czynników. Jeśli więc Twój alkomat jest kalibrowany conajmniej raz na 6 miesięcy, to najprawdopodobniej jego wyniki są prawidłowe. Więcej o czynnikach wpływających na wyniki pomiarów alkomatów przeczytasz pod adresem: **alkotester.pl**

KARTA GWARANCYJNA

1. Importer gwarantuje poprawne działanie alkomatu przez 12 miesięcy od dnia sprzedaży, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz według szczegółowych zasad określonych w instrukcji obsługi.
2. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje bezpłatną naprawę w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem sytuacji określonych w instrukcji obsługi poniżej.
3. Jeżeli alkomat jest niesprawny lub wymaga naprawy skontaktuj się ze Sprzedawcą lub serwisem Importera w celu ustalenia ewentualnej przyczyny. Alkomat należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub do siedziby Importera w kompletnym, oryginalnym opakowaniu wraz z akcesoriami, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
4. Gwarancją nie są objęte podzespoły podlegające zużyciu oraz dekalibracja urządzenia (patrz instrukcja).
5. Gwarancja nie obejmuje usterek:
 - a) powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji, lub użytkowaniem alkomatu niezgodnie z przeznaczeniem spowodowanych samowolnym wprowadzaniem modyfikacji produktu, lub powstałych na skutek napraw
 - b) dokonywanych przez osoby nieupoważnione przez Importera uszkodzeń mechanicznych
 - c) powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania, transportu lub użytkowania w warunkach
 - d) utrudniających prawidłową eksploatację
6. Jakikolwiek uchybienie warunkom realizacji gwarancji będzie podstawą do odrzucenia roszczenia naprawy.

Data i miejsce sprzedaży:

Numer seryjny urządzenia:

Pieczęć Sprzedawcy:



MASZ?
WĄTPLIWOŚCI

061 83 12345
663 000 633

ZADZWOŃ - POMOŻEMY!

data	nr zgłoszenia	podpis

OBŚLUGĘ SERWISOWĄ URZĄDZENIA PROWADZI:



UWAGA!!!

Znak przekreślonego kosza informuje, że produkt ten, jako odpad, może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Polskie prawo zabrania wyrzucania zużytych części z tego urządzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. O punktach zbiórki informują władze lokalne. Chroń środowisko naturalne!



Uważasz, że Twój alkomat wymaga obsługi serwisowej?

Zarejestruj się online, a nadasz alkomat do nas **zupełnie bezpłatnie!**

SYSTEM ZGŁOSZEŃ ONLINE TO SAME KORZYŚCI!



Darmowa wysyłka
alkomatu do
serwisu!



Oszczędność
Twojego czasu.
Wszystko załatwisz
w kilka minut.



Szybsza realizacja
usługi - zgłoszenia
online traktujemy
priorytetowo.



Powiadomienia
SMS o statusie
usługi oraz usługa
przypominania o
zbliżającym się
terminie kolejnej
kalibracji.

System zgłoszeń online dostępny jest pod adresem:

www.serwis.alcoforce.pl/xs

Lub za pośrednictwem kodu QR:





CENTRALA

ul. 28 czerwca 1956 r 223/229
61-485 Poznań
tel/fax (+48 61) 8312345
tel. 663 000 633 / 609 444 454

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Pasaż Ursynowski 11/ lokal U7
02-784 Warszawa
tel/fax (+48 22) 376 25 44